

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Dimensiones externas.** Alto: 33 cm
Ancho: 44 cm
Profundidad: 30 cm
- **Dimensiones de la cámara.** Alto: 20cm
Ancho: 33.5 cm
Profundidad: 22 cm
- **Tensión del funcionamiento.** 110V/220V según lo indicado
- **Consumo aproximado.** 600 watts
- **Accesorios.** 3 bandejas de acero inox. Perforadas, de 33.5 x 19.0 x 2.0 cm.
1 extractor de bandeja.

Fabricado por:



Blanco Encalada 80 CP (B1603BMB) - Villa Martelli
Provincia de Buenos Aires - Argentina
[Http:// www.agssa.com](http://www.agssa.com)

KiSteril

ESTERILIZADOR POR CALOR SECO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

KiSteril



ESTERILIZADOR POR CALOR SECO

INSTALACIÓN

- Antes de utilizar por primera vez, verifique que no existan restos de material de empaque o de materiales de protección del acero.
- Coloque la unidad de manera de dejar libres 10 cm en todo su entorno.
- Este equipo cuenta con una descarga a tierra, y esta diseñado para funcionar exclusivamente con conexión de descarga a tierra. Por su seguridad, haga verificar que su tomacorriente cuente con la misma.
- No utilice adaptadores.
- En caso de utilizar alargue, asegúrese que el mismo sea apto para una consumo mayor a 6 Amperios

MODO DE OPERACIÓN

La esterilizadora **K-Steril**, le permite operar en forma automática o forma manual.

OPERACIÓN AUTOMÁTICA (Parámetros pre-programados)

La esterilizadora **K-Steril**, posee pre-almacenados en su memoria 4 programas de temperatura y tiempo. Para seleccionarlos, proceda de la siguiente manera:

- Encienda la esterilizadora mediante la tecla **ON-OFF**, el display mostrará la palabra **PRO**.
- Pulse la tecla **PROGRAMA** en forma secuencial, hasta que aparezca el número de programa seleccionado.

PROG. 1	Temperatura 180 °C	Tiempo de esterilización 60 min.
PROG. 2	Temperatura 180 °C	Tiempo de esterilización 90 min.
PROG. 3	Temperatura 170 °C	Tiempo de esterilización 120 min.
PROG. 4	Temperatura 170 °C	Tiempo de esterilización 150 min.

- Confirme su selección pulsando la tecla **ACEPTAR**

OPERACIÓN MANUAL (Selección de tiempo y temperatura)

- Encienda la esterilizadora mediante la tecla **ON-OFF**, el display mostrara la palabra **PRO**.
- Pulsando las teclas **“UP”** o **“DOWN”**, seleccionara la temperatura deseada (se encenderá el indicador luminoso correspondiente a la temperatura).
- Confirme su selección mediante la tecla **ACEPTAR**.
- En el display aparecerá la palabra **TIE**, ahora pulsando las teclas **“UP”** o **“DOWN”** seleccionara el tiempo de esterilización (se encenderá el indicador luminoso correspondiente al tiempo).
- Confirme mediante la tecla **ACEPTAR**.

Al finalizar el ciclo, tanto en modo automático, como manual, el display indicara la palabra **END** y emitirá tres Bips, colocándose nuevamente en el modo **PRO**.

FUNCIONES ADICIONALES

- Una vez que se haya programado la esterilizadora, el display alternara entre la lectura de la temperatura y el tiempo, para fijar el display en el modo temperatura, tiempo o alternante,

pulse secuencialmente la tecla **ACEPTAR**.

- Para resetear la esterilizadora en cualquier momento del ciclo de esterilización, pulse la tecla **PROGRAMA** durante 5 segundos.

IMPORTANTE

- Gasas no deben ser esterilizadas a **180 °C**, la temperatura recomendada es de **130 °C**
- Cuando esterilice instrumental ensobrado, asegúrese siempre que las bolsas sean las adecuadas para la esterilización por calor seco.

MENSAJES DE ERROR

En el caso en que alguna falla sea detectada, el display indicara las siguientes leyendas:

- tc: La termocupla se encuentra dañada o desconectada
- trI: El Triac se encuentra en cortocircuito
- Lot: La temperatura de la camara ha descendido mas de 30°C, puede deberse a que se ha dejado la puerta abierta demasiado tiempo o que la resistencia se haya desconectado o dañado.
- rEs: La temperatura de la camara no se eleva, esto puede deberse a que la resistencia se encuentra desconectada o dañada.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

A.G.S. Garantiza su esterilizadora por calor seco K.Steril contra posibles defectos de producción por un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de compra.

Durante este período, en caso de defectos, el cliente debe devolver a A.G.S el material, adecuadamente empacado, bajo sus propios costos. Personal calificado de A.G.S. Verificará y cambiará las partes dañadas.

Todo el envío del material enviado a cargo de A.G.S., De no haberse acordado previamente en forma escrita, será devuelto al remitente.

LA GARANTÍA QUEDARÁ SIN EFECTO EN CASO DE:

-Ruptura accidental -Falta de cuidado -Instalación eléctrica no conforme con las reglas vigentes -Instalación incorrecta -Uso incorrecto u no observación de las condiciones especificadas en el presente manual -Uso de componentes no originales -Modificaciones y/o reparaciones, las cuales no han sido autorizadas por escrito o que no hayan sido efectuadas por personal calificado de A.G.S.

Control de garantía de esterilizadora por calor seco K- Steril

Nº de garantía

Voltaje (110/220)

Datos de la casa vendedora: Razón Social

Dirección: País.....

fecha de compra..... Nº de factura.....

Datos del cliente: Nombre y Apellido:.....

Dirección: País.....

IMPORTANTE: Recuerde que será válida la garantía cuando Ud. complete este cupón y lo envíe a la dirección que figura al final del manual.